

Description

Concentré liquide pour la désinfection et le nettoyage sans fixation des protéines des instruments médicaux et dentaires, des instruments rotatifs de précision et des endoscopes rigides.

• Certifié par VAH, • sans aldéhydes ni phénols, • sans CAQ (QAC).

Champs d'application: Concentré liquide de haute efficacité pour l'usage sur 1.) l'instrumentation dentaire et médicale universelle (instruments diagnostiques, de conservation et chirurgicaux comme p.ex. pinces dentaires, élévateurs, miroirs buccaux, endoscopes rigides etc.); 2.) des instruments de précision dentaires rotatifs comme p.ex. fraises en acier, fraises en métal dur, fraises diamantées, fraises chirurgicales, coupe-couronne, instruments canaux, polissoirs en caoutchouc etc.

Application et Dosage

Spectre d'activité: Critère de test: Conditions de saleté, température ambiante (en bain d'immersion): bactéricide (EN 13727, EN 14561) 0,5 % en 5 minutes; levuricide (EN 13624, EN 14562) 3,0 % en 5 minutes; tuberculocide (EN 14563) 2,0 % en 15 minutes.

Spectre d'activité: Critère de test: Conditions de propreté, température ambiante: virucide (RKI/DVV) contre les virus enveloppés, p.ex. VHB, VHC, VIH et virus influenza 1,0 % en 10 minutes; tuberculocide (EN 14563, en bac à ultrasons) 2,0 % en 5 minutes.

Application: Nous recommandons d'utiliser une solution de **EC 50** concentrée à 0,5 %. Pour la production de la solution prête à l'emploi mélanger p.ex. 5 ml de concentré avec 995 ml de l'eau. S'il est nécessaire d'avoir des temps de contact plus courts on peut produire aussi des solutions prêtes à l'emploi plus concentrées et nettoyer les instruments dans un bac à ultrasons (voir spectre d'activité).

Pour le nettoyage et la désinfection immerger complètement et sans bulles les instruments dans la solution prête à l'emploi. Après le temps indiqué prendre les instruments du bac et rincer avec de l'eau appropriée (p.ex. eau du robinet). En cas des souillures tenaces, brosser les instruments avec une brosse en plastique sous l'eau courante et répéter la procédure de désinfection. Après avoir désinfecté les produits invasifs avec **EC 50**, une étape finale de traitement (stérilisation) est obligatoire.

Ne convient pas au PVC-P, au polycarbonate, à l'aluminium, aux alliages de métaux légers, au laiton et aux marquages de couleur dans les bains à ultrasons. Compatibilité matérielle limitée avec le NBR (caoutchouc acrylonitrile-butadiène), le silicone et le PET (polyéthylène téréphtalate).

Ne pas utiliser **EC 50** sur les endoscopes flexibles. Application seulement par du personnel médical qualifié!

Durée de conservation: Solution prête à l'emploi (non utilisée) = 30 jours; solution prête à l'emploi (en usage) = 7 jours (si la contamination est clairement visible, changer la solution prête à l'emploi plus tôt le cas échéant).

Dangers et Consignes de Sécurité

Selon Règlement (CE) n° 1272/2008 [SGH] **EC 50** est classé dangereux (corrosion cutanée et lésions oculaires graves, toxicité aiguë (orale) de la catégorie 4, toxique spécifique pour un organe cible (exposition répétée) de catégorie 2, inflammable, corrosif pour les métaux [aluminium et métaux légers], dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu catégorie 1, dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique catégorie 2). Veuillez également à ce sujet respecter les indications mentionnées dans la fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la manipulation.

Ne pas mélanger **EC 50** avec des acides, des produits contenant des aldéhydes ou d'autres produits de nettoyage et des désinfectants!

Veuillez signaler tout incident grave lié au produit à: ALPRO MEDICAL GMBH, e-mail: Complaints@alpro-medical.de, tél.: +49 7725 9392-0 et à l'autorité compétente de votre État membre.

Caractéristiques physico-chimiques

Densité: 0,97 - 0,99 g/cm³ • pH (concentré): 10 - 11. Les agents de surface dans notre produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Ingrédients selon Annexe VII A, Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents: <5 % agents de surface cationiques, <5 % agents de surface non ioniques, <5 % EDTA, désinfectants, parfums, d-Limonène.

Élimination de la Solution usée

À partir d'une dilution à 1 %, le concentré n'est plus classé comme substance dangereuse et peut être ajouté aux eaux usées en tant que tel, conformément aux réglementations locales et aux limites de pH, si la pollution apportée le permet. Traiter le concentré dans un centre d'élimination pour déchets spéciaux, en respectant les prescriptions correspondantes.

Code de déchet: 07 06 01*, „eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses“; 15 01 10*, „emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus“.

Conditionnement, Stockage et Transport

Récipients: 1 L PE-bouteille  8000885. Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé et dans un endroit bien ventilé à une température entre +5 °C et +30 °C. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Ne pas stocker avec des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des agents oxydants ou des acides durs. Maintenir sous clef ou permettre l'accès uniquement aux experts ou à leurs mandataires.

Se conserve 3 ans à partir de la date de fabrication (voir l'étiquette supplémentaire).

Pour tous les modes de transports: classe de danger 8 (3), UN 2920. Température de transport: -20 °C – +50 °C.